


RUN GO™

Фитнес браслет с функцией ЭКГ RUNGO R3

Руководство пользователя

Описание устройства

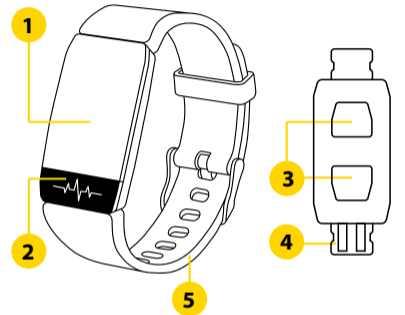

1. Экран
2. Функциональный электрод (управляющая область)
3. Датчики (электроды)
4. Зарядные контакты
5. Ремешок

Назначение устройства

Фитнес браслет RUNGO R3 Advanced является Bluetooth устройством (фитнес-трекером), предназначенным для получения информации о состоянии здоровья и физической активности пользователя. Интерфейс Bluetooth в браслете используется для соединения со смартфоном, планшетом или другим совместимым мобильным устройством. Управление и настройка браслета происходят через оригинальное мобильное приложение, установленное на совместимое мобильное устройство пользователя.

Заряд аккумулятора



Заряд браслета происходит через зарядные контакты. Для того, чтобы зарядить Ваш браслет, выньте его из силиконового ремешка и подключите к сетевому зарядному устройству через USB коннектор (не входит в комплект поставки). Выходные параметры сетевого зарядного устройства не должны превышать 5В, 2А. Помимо сетевого зарядного устройства может быть использован USB порт компьютера, ноутбука и т.д.

Включение браслета

Включение устройства осуществляется путем нажатия на сенсорную зону (электрод) в нижней части браслета. Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд.

Выключение браслета

Для того чтобы выключить браслет, зайдите в раздел меню «Функции», подраздел «Выключить». Нажмите и удерживайте порядка 5 секунд.

Мобильное приложение

Скачайте приложение RUNGO для того, чтобы управлять, производить настройку браслета и отслеживать свои спортивные достижения. Вы можете скачать приложение для операционных систем Android и iOS, отсканировав QR код ниже:



Либо перейдите на сайт www.run-go.ru в раздел «Приложение». Обратите внимание: для работы приложения требуется мобильное устройство на базе Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше с поддержкой Bluetooth 4.2

Использование браслета

Управление и активация основных функций браслета осуществляется путем нажатия на нижнюю сенсорную зону дисплея (электрод). Именно она является функциональной областью, воспринимающей нажатия. Для того, чтобы попасть в меню браслета, находясь на главном экране, нажмите на сенсорную зону (электрод). Для переключения разделов меню, кратко нажимайте на сенсорную клавишу дисплея. Для выбора необходимого меню или запуска действия, зажмите сенсорную клавишу на 2 секунды, находясь в соответствующем разделе меню. Для того, чтобы активировать браслет из режима ожидания, кратко коснитесь его сенсорной зоны (электрода).

Подключение браслета

Скачав приложение, запустите его. Убедитесь, что на мобильном устройстве активировано Bluetooth соединение (сделайте это в настройках Вашего смартфона или планшета). На стартовом экране приложения отобразится список доступных к подключению Bluetooth устройств, находящихся в досягаемости Вашего смартфона. Выберите устройство RG R3, завершите подключение.

Дата и время

При подключении браслета через приложение, дата и время будут настроены автоматически, в соответствии с системными настройками мобильного устройства.

Персональные настройки и разрешения






Для корректной работы функции подсчета шагов (Шагомер), пожалуйста, заполните персональные физические параметры организма: рост, вес и возраст. Для этого перейдите в соответствующий подраздел приложения в меню «Настройки». Обратите внимание: для полноценной работы необходимо предоставить приложению необходимые разрешения. Запросы о разрешениях будут показаны автоматически при запуске приложения.

Функционал браслета / Разделы Меню



Домашний экран

Основной экран браслета. Данный экран отображается каждый раз, когда Вы активируете браслет. На представленном экране отображаются сведения о времени, дате, состоянии подключения, заряде аккумулятора, и прочие данные (в зависимости от выбранного дисплея). В браслете предустановлено 5 вариантов домашних экранов. Изменить стиль данного экрана можно долгим нажатием на сенсорную зону (до 3 сек.) – выбрать вариант – зафиксировать выбор долгим нажатием (до 3 сек.).

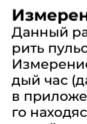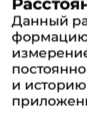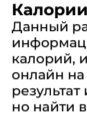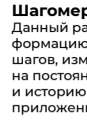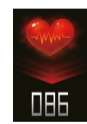

Шагомер

Данный раздел меню содержит информацию о количестве пройденных шагов, измерение происходит онлайн на постоянной основе. Также результат и историю измерений можно найти в приложении RUNGO.

Калории


Данный раздел меню содержит информацию о количестве сожженных калорий, измерение происходит онлайн на постоянной основе. Также результат и историю измерений можно найти в приложении.

Расстояние

Данный раздел меню содержит информацию о пройденном расстоянии, измерение происходит онлайн на постоянной основе. Также результат и историю измерений можно найти в приложении.

Измерение пульса

Данный раздел меню позволяет измерить пульс (сердечный ритм). Измерение может производиться каждый час (данный режим активируется в приложении), либо вручную. Для этого находясь в меню, нажмите и удерживайте электрод порядка 2 секунд. Также результат и историю измерений можно найти в приложении. Обратите внимание: для более точного измерения браслет должен плотно прилегать к коже запястья.

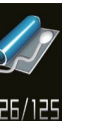

Измерение артериального давления

Данный раздел меню позволяет измерить артериальное давление (кровяное давление). Измерение может производиться каждый час (данный режим активируется в приложении), либо вручную. Для этого находясь в меню, нажмите и удерживайте электрод порядка 2 секунд. Также результат и историю измерений можно найти в приложении. Обратите внимание: для более точного измерения браслет должен плотно прилегать к коже запястья.

Содержание кислорода в крови

Данный раздел меню позволяет измерить содержание кислорода в крови (насыщенность). Измерение может производиться каждый час (данный режим активируется в приложении), либо вручную. Для этого находясь в меню, нажмите и удерживайте электрод порядка 2 секунд. Также результат и историю измерений можно найти в приложении. Обратите внимание: для более точного измерения браслет должен плотно прилегать к коже запястья.

Состояние здоровья (индекс иммунитета)

Данный раздел меню позволяет измерить индекс иммунитета. Измерение может производиться каж-



дый час (данный режим активируется в приложении), либо вручную. Для этого находясь в меню, нажмите и удерживайте электрод порядка 2 секунд. Также результат и историю измерений можно найти в приложении. Обратите внимание: для более точного измерения браслет должен плотно прилегать к коже запястья.

ЭКГ

Данный раздел меню позволяет построить электрокардиограмму вашего сердечного ритма. Запуск ЭКГ может быть произведен через меню браслета (долгим нажатием электрода от 2 секунд) и через раздел приложения RUNGO. Результат ЭКГ может быть просмотрен в приложении, и сохранен в виде файла. Обратите внимание: наилучший результат построения кардиограммы достигается в состоянии покоя. Старайтесь не шевелить рукой во время работы браслета.

Измерение температуры тела

Данные об измерении температуры тела отображаются на главном экране браслета (онлайн измерение) либо в данном разделе меню.


Обратите внимание:

Браслет RUNGO R3 не является медицинским измерительным прибором. Снимаемые показания носят исключительно ознакомительный характер, могут отличаться от действительных значений и не могут являться основанием для какого-либо самостоятельного медицинского вмешательства. Для вычисления значений показателей используется PPG датчик (методика инфракрасной фотоплетизмографии). Пожалуйста, обратитесь к врачу, если вы почувствовали себя плохо!



Сообщения

В данном разделе меню будут содержаться последние 3 сообщения и уведомления из мессенджеров, установленных на телефоне. Обратите внимание: для получения уведомлений и SMS сообщений браслет и телефон должны быть сопряжены по Bluetooth. Перечень приложений, уведомления которых будет отображать браслет, Вы можете задать в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

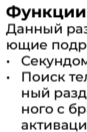

Функции

Данный раздел меню содержит следующие подразделы:

- Секундомер
- Поиск телефона. Используйте данный раздел для поиска сопряженного с браслетом смартфона. При активации поиска, смартфон издаст звуковой сигнал.
- Музыка – дистанционное управление медиа
- Яркость экрана
- Имя браслета
- Выключение

Дополнительный функционал

Обратите внимание: часть данных функций активируется только через приложение и не содержится в интерфейсе браслета

Входящие звонки

Браслет может отображать уведомление о входящем вызове на ваш смартфон. Для этого должно быть установлено Bluetooth соединение между данными устройствами. Активировать данный тип уведомлений вы можете в разделе «Настройки» приложения RUNGO.

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» браслет не будет уведомлять Вас о каких-либо событиях. В приложении Вы можете задать временной интервал данного режима.

Режим «Разомнитесь!»

В режиме «Разомнитесь!» (отсутствие движения) браслет может уведомлять Вас о том, что Вы долгое время находитесь без движения и есть необходимость немного размяться. Интервал оповещений Вы можете настроить в приложении.

Будильник

Вы можете настроить время Будильника в приложении. При достижении заданного времени браслет издаст вибросигнал.

Настройка экрана

Вы можете настроить автоматическую активацию экрана браслета при подъеме руки в разделе «Настройки» приложения RUNGO. Также возможно задать временной интервал, когда данная функция является активной, что обезопасит Вас от случайного включения экрана во время сна.

Сброс устройства

Вы можете удалить из приложения все данные о вашем устройстве, совершив его сброс в соответствующем разделе меню.

Отвязка устройства

Для того чтобы удалить браслет из вашего смартфона, отвяжите его в соответствующем разделе меню Приложения. Также для полного разрыва связи с браслетом, советуем Вам «забыть» браслет в настройках Bluetooth вашего смартфона.

Технические характеристики:

- Процессор: HS6620D
- Bluetooth 4.0
- Дисплей 1,14"
- Разрешение дисплея 135*240
- Вибрация есть
- Тип зарядного устройства: USB
- Емкость аккумулятора: 105 мАч
- Время работы: до 7 дней
- Совместимость: Android 5.0 и выше или iOS 9.0 и выше
- Приложение: RUNGO

Торговая марка:

Rungo

Модель устройства:

R3

Комплектация:

- Фитнес-браслет Rungo R3
- Ремешок
- Инструкция по эксплуатации

Комплектация может быть изменена без дополнительного уведомления.

Информация о гарантии и сертификатах:

Производитель:

Экселент групп (ХК) Ко. Лимитед

Адрес производителя:

рм 1702, 17/Ф, Сино Центр 582-592, Натан роуд, Монкок, Коулун, Гонконг

Импортер:

ООО «ДЕФАКТО»

Адрес импортера :

115114, Россия, город Москва, улица Кожевническая, дом 16, строение 4, помещение №16
E-mail: info@defacto-group.ru



Приступая к работе с устройством, прочтите эту информацию, в противном случае это может стать причиной травматизма или несоответствия устройства местному законодательству. Береечь от детей. Не допускайте к устройству детей, чтобы исключить возможные травмы.

Использование и уход

- Чтобы обеспечить надлежащий уход за этим устройством, не подвергайте его воздействию:
- Любой агрессивной жидкости. Неподвергайте устройство слишком долгому воздействию воды, дождя, влаги, пота и других жидкостей.
 - Сильного тепла или холода: Не подвергайте устройство воздействию температуры ниже -10/14 или выше 55/131.
 - СВЧ-излучения: Не пытайтесь сушить устройство в микроволновой печи.
 - Пыли и грязи. Не подвергайте устройству воздействию пыли, грязи, песка, пищевых продуктов или других посторонних веществ.
 - Жидких чистящих средств: Для очистки устройства пользуйтесь только мягкой сухой тканью. Не пользуйтесь спиртом или другими жидкими чистящими средствами.
 - Механическому воздействию: Не роняйте устройство.

Внимание!

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в комплектацию, техническое и программное обеспечение оборудования без предварительного уведомления. Несоблюдение данной инструкции может привести к выходу устройства из строя и снятию его с дальнейшего гарантийного обслуживания. Электронная версия Руководства пользователя находится на сайте www.run-go.ru
Полный список авторизованных сервисных центров также доступен на сайте www.run-go.ru

Гарантийная информация

Гарантия начинается с момента покупки устройства.

Сроки гарантии:

Основное изделие – 12 (двенадцать) месяцев.
Батарея и зарядное устройство (при наличии в комплекте поставки) – 6 (шесть) месяцев.
Другие аксессуары – 3 (три) месяца.
Срок эксплуатации - 2 года

1. Данная гарантия распространяется только на дефекты и поломки, произошедшие по вине изготовителя.
2. Изготовитель устанавливает срок службы на основное изделие – 2 (два) года с даты изготовления изделия при условии соблюдения правил эксплуатации. По истечении срока службы изделия изготовитель рекомендует обратиться в Авторизованный Сервисный Центр (АСЦ) для проведения профилактических работ и получения рекомендаций по дальнейшей безопасной эксплуатации изделия.
3. Право на гарантийное обслуживание утрачивается в случае, если неисправность возникла из-за нарушений клиентом правил пользования устройством (например, в результате механических повреждений или попадания влаги).
4. В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре потребитель вправе предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых установлен Законом РФ «О защите прав потребителей».
5. Перед началом использования устройств изучите прилагаемую инструкцию по эксплуатации и строго следуйте ей.
6. Гарантийный талон действителен только при наличии правильно и четко указанных: модели, даты продажи, четких печатей фирмы-продавца, подписи покупателя. Модель и серийный номер изделия должны соответствовать указанным в гарантийном талоне.

Страна производства

Произведено на заводе в Китае.
Made in China.

Правила и условия безопасной эксплуатации (использования)

Оборудование предназначено для использования в закрытых отапливаемых помещениях при температуре окружающего воздуха -25°C – +85°C, и относительной влажности не выше 95%. Оборудование не нуждается в периодическом обслуживании в течение срока службы.
Срок службы 2 года.

Правила и условия монтажа

Монтаж оборудования производится в соответствии с данным руководством пользователя.

Правила и условия хранения

Оборудование должно храниться в закрытых помещениях, в заводской упаковке, при температуре окружающего воздуха -20°C – +45°C, и относительной влажности не выше 95%.

Правила и условия перевозки (транспортирования)

Перевозка и транспортировка оборудования допускается только в заводской упаковке, любыми видами транспорта, без ограничения расстояний.

Правила и условия реализации

Без ограничений

Правила и условия утилизации

По окончании срока службы оборудование устройство утилизируется в соответствии с правилами и законодательством страны эксплуатации, а также рекомендации производителя

Месяц и год изготовления

Дата изготовления устройства указана на упаковке.

Знак соответствия



For English version of User Manual, please, visit our website: www.run-go.ru

Товар сертифицирован.

Данные о сертификатах вы можете получить на сайте www.run-go.ru

Гарантийный талон

Изделие

Модель

Серийный номер

Дата продажи

Продавец

(фамилия)

(подпись)

(телефон)

(адрес)

Гарантийный срок, условия гарантийного обслуживания и срок службы изделия указаны в инструкции по эксплуатации